

# Hugお手入れ方法

詳細は各機種の取扱説明書をご確認ください。

## Hug T1・Hug L1・Hug L1WP 本体表面とリモコン

### 〈お手入れ方法〉

- ① やわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞って拭きます。
- ② 水でひたした布をかたく絞って水拭きして、中性洗剤を拭き取ります。
- ③ 乾いた布で乾拭きします。

### 〈消毒方法〉

消毒する場合は、必ず下記のいずれかの消毒剤を指定の濃度でご使用ください。ご使用時には、各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってください。

- 76.9～81.4 v/v% 消毒用エタノール
- 0.02～0.1% 次亜塩素酸ナトリウム（ハイターなど）


## Hug L1WP カバー類

### ① 各身体保持部と膝あてのカバーを取り外す

取り外したカバーにはクッション材（エアセル）が入っていますが、取り出さないでください。

### ② 取り外したカバーを洗濯し、乾かす

カバーは洗濯機で洗濯・脱水することができます。洗濯・脱水の際、カバー内部のクッション材（エアセル）を取り出さないでください。

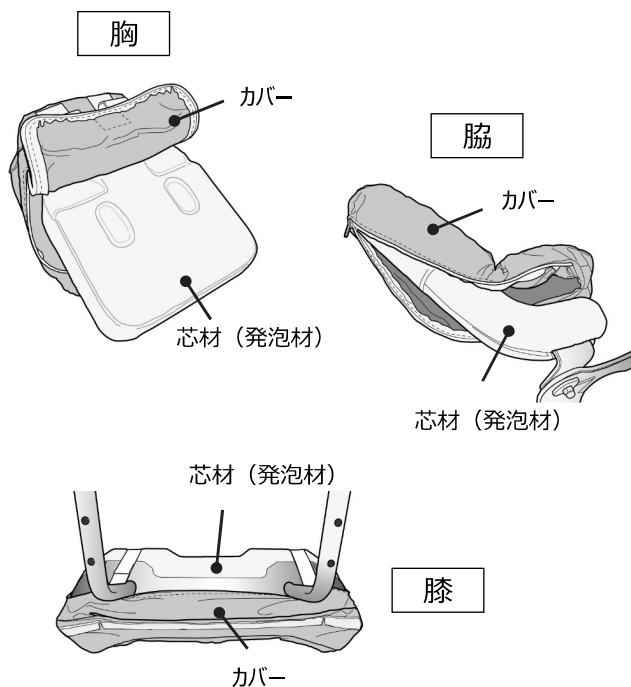

〈洗濯の条件について〉洗濯機で洗濯する際は洗濯ネットをご使用ください。

表示	内容
	液温は 30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理を行ってください。
	塩素系および酸素系の漂白剤は使用しないでください。
	タンブル乾燥はしないでください。
	直射日光を避け、つり干しをしてください。
	アイロンがけはしないでください。
	ドライクリーニングをしないでください。
	ウェットクリーニングをしないでください。



Hug T1とL1のレザーカバーは洗濯（手洗い含む）をすることができません。本体表面と同じようにお手入れしてください。